

## ПАСПОРТ

### Сжигатель игл и деструктор шприцев с гильотиной для отреза канюли Nulife DOTS

**1. Сжигатель игл и деструктор шприцев с гильотиной для отреза канюли Nulife DOTS** - безопасный и компактный настольный прибор, с помощью которого можно легко утилизировать использованные иглы и шприцы благодаря встроенному сжигателю и ножу для отрезания канюли шприца. В сравнении с механическими устройствами для деструкции игл, где иглы режутся, но равно остаются острыми, инфицированными и могут быть причиной проникновения инфекции в организм здорового человека. В свою очередь сжигатель игл и деструктор шприцев сжигает иглу, обеззараживая ее таким образом. Прибор предназначен, главным образом, для применения в лабораторных условиях.



#### 2. Инструкция по эксплуатации.

- 1) Подключите устройство. Загорится красная лампочка на индикаторе Вкл./Выкл.(On-Off).
- 2) Использованный шприц с иглой аккуратно вставьте в отверстие, находящееся в центре устройства с надписью Вставьте сюда иглу ( Insert Needle Here) . Иглу от шприца не отсоединяйте и старайтесь держать шприц вертикально для получения лучшего результата.
- 3) Слегка нажмите на шприц, чтобы игла медленно и постепенно начала входить в отверстие.
- 4) Игла будет разрушена через 2-3 секунды, после чего основание шприца достигнет отверстия, куда вставлялась игла.
- 5) Чтобы обрезать основание шприца необходимо легко пальцами потянуть рычажок ножа слева направо.
- 6) Шприц одновременно можно вращать рукой для ускорения процесса срезания верхней части шприца.
- 7) Срезанные остатки собираются
- 8) Оставшаяся часть от шприца
- 9) Пожалуйста, опустошайте



#### 3. Технические характеристики

Размеры	165 мм x 115 мм x 120 мм
Вес	1,7 кг.
Эл. питание	230 вольт, +- 10% 50 Гц, однофазный
Защита	2 амперные ¼ дюйма стеклянные предохранители

#### 4. Комплектация:

1. Сжигатель игл и деструктор Nulife DOTS – 1 шт.
2. Паспорт и инструкция по применению

#### 5. Гарантийный срок 1 год.

#### 6. Производитель:

MRK HEALTHCARE , Индия.  
Адрес:  
B4/5 Byculla Service Industries  
Premises, Sussex road,  
D.K.Marg, Byculla ,  
Bombay 400 027, INDIA.